


1.



+



+

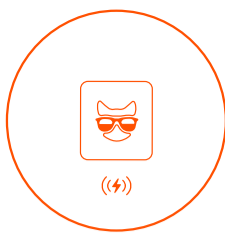

Alcomeeter

Magnetiga
pudeliavajaJuhtmevaba
laadija

2.

1



Alcocat



2



3.

3



4



4.

Ühilda Alcocat oma nutitelefoni

- Alcocat äpp lae alla App Store'ist või Google Play'st
- Lülita sisse nutitelefoni Bluetooth ja ava äpp
- Raputa alkomeetrit 3 korda, et lülitada sisse valged LED tuled
- Ühilda alkomeeter ja nutitelefoni ning alusta kasutamist

Alcomeetri LED tuled tähendused

- Hajuv valge tuli - valmis ühilduma nutitelefoni
- Lühike punane tuli - aku on tühi
- Püsiv valge tuli - seadmed on ühildatud

5.



Kuidas kasutada

- Peale valgete LED tudele süttimist, vajuta äpis nuppu või raputa seadet veel kord
- Kui sinised LED tuled on hakanud vilkuma, on alkomeeter alustanud üles soojenemist
- Alcomeetrit käes hoides veendu, et õhuavad seadme külgedel ei oleks kaetud
- Kui sinised LED tuled on hakanud kiiresti vilkuma, siis puhu järjest 5 sekundit sügavalt kopsudest alkomeetri avasse

6.

- Stabiilne sinine LED tuli näitab, et alkomeeter mõõdab alkoholi sisaldust veres
- Vilkuv sinine LED tuli peale mõõdistamist tähendab, et tulemus on kalkuleeritud
- Vilkuv punane tuli peale mõõdistamist, tähendab viga. Proovi uuesti
- Mõõdetud tulemus on näha ka seadmel:
 - roheline tuli - kaine
 - kollane tuli - kuni 0.2‰
 - punane tuli - üle 0.2‰

Juhul kui nutitelefoni aku on tühi, siis saad alkomeetrit kasutada ka eraldi. LED tuled värvid viitavad kaudselt

7.

tulemusele. Raputa alkomeetrit ja juhindu LED tuledest nagu eelpool kirjeldatud.


Täpsed tulemused

Et saada täpsem tulemus, oota 20 minutit peale viimast jooki või sigaretti. Kui seadet pole kasutatud 24 tundi, võib seade näidata madalamaid tulemusi, kuna sensoris võivad esineda tolmu osakesed. Kui vaja, palun korda puhumist.

Juhtmevaba laadimine

Punased LED tuled seadmel viitavad alkomeetri tühjale akule. Laadimine kestab kuni 3 tundi.

8.

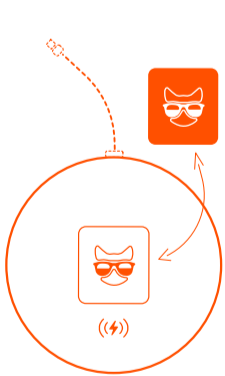

- Ühenda voluvõrgus olev mikro USB kaabel laadijaga
- Aseta alkomeeter täpselt laadija keskele
- Jälgi vilkuvat tuld:
 - punane tuli - kuni 20% laetud
 - kollane tuli - kuni 70% laetud
 - roheline tuli - kuni 99% laetud
- Stabiilne roheline tuli - alkomeeter on 100% laetud

9.

Garantii: Käesolevaga kirjeldatud ei kohaldata toote garantiid järgnevatel tingimustel:

- Mitte Alcocat lisatarvikute kasutamine, näiteks laadidajad
- Toote tavapärase kasutamise või vananemise, nagu kriimustused, mõlgid, praod sh liikuvate osade kulumine aja jooksul;
- Defektid või kahjustused, mis on põhjustatud toote väärkasutusest, õnnetusest, muutustest, ebatavalisest pingest, muudatustest, ebaõigest või loata parandamisest, ebaõigest ladustamisest või kolmanda osapoole rakenduse allalaadimisest
- Kahju, mis on põhjustatud toodete kasutamisest väljaspool lubatud ja kavandatud kasutusalasid, mis on kirjeldatud

10.

Alcocat'i juhendites;

- Toote riistvara või tarkvara muutuste läbiviimine kellegi teise poolt kui Alcocat ametlikult esindajalt;
- Ebaõige pinge, toiteallikas või patareid sh aku kasutamine
- Kahjustused liigse niiskuse tõttu;
- Alcocat alkomeetrit on kasutatud enne 20 minutit pärast alkohoolse joogi tarbimist;
- Silikooni aurud/gaasid õhus kahjustavad toodet. Toode on mõeldud kasutamiseks värske õhuga ruumis

Et päästa üks puu, palun loe ja vaata videoid kõik vajaliku privaatsuspoliitika, kasutusjuhendi, kasutamise tingimuste ja KKK kohta veebilehelt alccocat.com

