

FR

Dans cette boîte, vous trouverez

1.



L'alcotest

Ouvre-bouteille
avec aimant

Chargeur
sans fil

2.



1




Alcotest

Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play

2

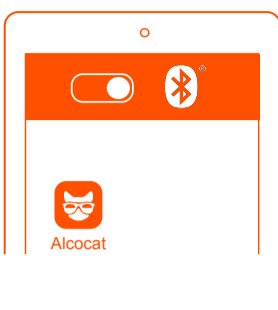

3.



3

4

Connecter Alcotest par Bluetooth avec votre smartphone

1. Téléchargez l'application Alcotest depuis d'App Store ou la Google Play

2. Activez le Bluetooth et ouvrez l'application

3. Secouez l'alcotest 3 fois pour allumer la LED blanche sur l'appareil

4.

4. Connecter l'alcotest à votre smartphone et commencer l'utiliser


Signaux lumineux de LED d'alcotest

Lumière blanche diminue - prêt pour appairer avec le smartphone

Lumière rouge brève - batterie vide

Lumière blanche stable - les dispositifs sont appairés

5.

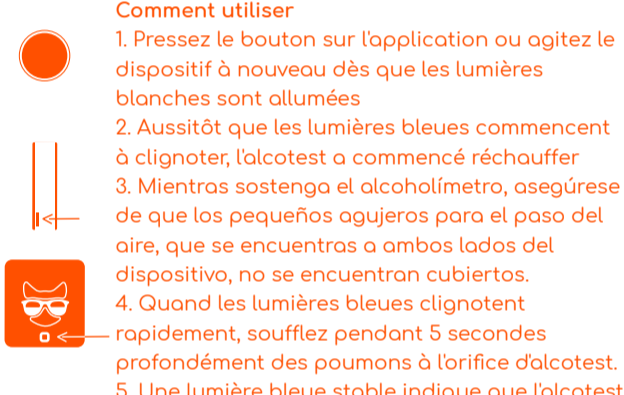

Comment utiliser

1. Pressez le bouton sur l'application ou agitez le dispositif à nouveau dès que les lumières blanches sont allumées

2. Aussitôt que les lumières bleues commencent à clignoter, l'alcotest a commencé réchauffer

3. Mientras sostenga el alcoholímetro, asegúrese de que los pequeños agujeros para el paso del aire, que se encuentran a ambos lados del dispositivo, no se encuentran cubiertos.

4. Quand les lumières bleues clignent rapidement, soufflez pendant 5 secondes profondément des poumons à l'orifice d'alcotest.

5. Une lumière bleue stable indique que l'alcotest

6.

mesure les résultats d'alcoolémie

6. Si une lumière bleue clignote après avoir effectué les mesures, cela signifie que le calcul d'alcoolémie a été effectué

7. Si une lumière rouge clignote, cela signifie qu'il y a une erreur. Essayez de nouveau

8. L'alcoolémie mesurée est indiquée sur le dispositif:

Lumière verte - sobre

Lumière jaune - moins que 0.2‰

Lumière rouge - plus que 0.2‰

Si la batterie du smartphone est vide, vous pouvez utiliser l'alcotest. Les couleurs des lumières LED indiqueront les résultats approximatifs mesurés. Agitez le dispositif et

7.

suivez les instructions des lumières LED décrits plus haut

Résultat précis


Pour obtenir un résultat précis, attendez 20 minutes après votre ultime boisson ou cigarette. Si le produit n'a pas été utilisé pendant 24 heures, l'appareil peut afficher un résultat inférieur en raison de particules de poussière.

Si nécessaire, s'il vous plaît répéter le souffle.

Chargement sans fil

La LED rouge sur l'appareil indique que la batterie est vide. Le chargement de la batterie peut prendre jusqu'à 180 minutes.

8.

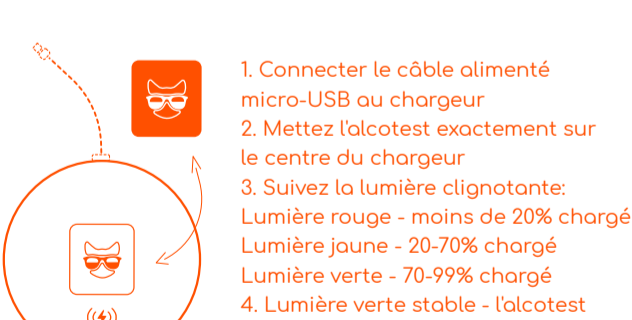

1. Connecter le câble alimenté micro-USB au chargeur

2. Mettez l'alcotest exactement sur le centre du chargeur

3. Suivez la lumière clignotante: Lumière rouge - moins de 20% chargé

Lumière jaune - 20-70% chargé

Lumière verte - 70-99% chargé

4. Lumière verte stable - l'alcotest pleine chargé

9.

Garantie: Sans limiter la portée de ce qui précède, la garantie ne s'applique pas au cas suivants:

- Utilisation avec accessoires non d'Alcotest, comme le chargeur sans fil;

- L'usure et le vieillissement normal du produit, tels que des éraflures, bosses, rayures, élargissement et pertes de ses parties avec le temps;

- Défauts ou dommages causés par une mauvaise utilisation, accident, altération, modification, réparation non autorisée, stockage inadéquat ou application tierce installée sur le produit

- Dommages causés par l'utilisation du produit en dehors de l'usage prévu et fournis par Alcotest;

- Modification du hardware ou software autre que par

10.

Alcotest officiellement.

- Avec usage incorrect du voltage, source d'alimentation ou de la batterie

- Dommages dû à une humidité excessive

- L'alcotest d'Alcotest a été utilisé 20 min après la dernière consommation d'alcool

- Composés de silicone / gaz endommageront le produit. Le produit est destiné à être utilisé dans les chambres remplies d'air frais.

Pour sauver un arbre, s'il vous plaît, lire et regarder les vidéos sur tout l'information de

politique de confidentialité, conditions d'utilisations, utilisation du dispositif, et

Foire aux questions à alcocat.com

