


1.



+



+

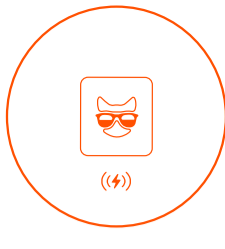

Alcotesteris

Butelio atidarytuvas su magnetu

Bevelis pakrovėjas

2.


1



Alcotocat



2

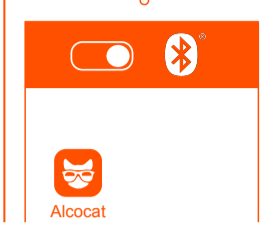

3.

3



4



4.

#### Sujunkite Alcotocat su išmaniuoju telefonu

1. Atsisiųskite programėlę „Alcotocat“ iš „App Store“ arba „Google Play“
2. Ljunkite „Bluetooth“ ryšį išmaniajame telefone ir atverkite programėlę
3. Papurtykite alcotesterį 3 kartus, kad įjungtumėte baltus įrenginio šviesos diodus
4. Sujunkite Alcotesterį su išmaniuoju telefonu ir pradėkite naudoti

#### Alcotesterio LED šviesų signalai

Gęstanti balta šviesa - pasiruošęs sujungimui su išmaniuoju telefonu

Trumpas raudonas signalas - baterija išsikrovė

Stabilus baltas signalas - įrenginiai yra sujungti

5.



#### Kaip naudoti

1. Paspauskite mygtuką programėlėje arba vėl papurtykite prietaisą po to kai balta šviesa užgeso
2. Pradėjęs mirksėti žydras LED signalas indikuoja jog alcotesteris ruošiasi darbui
3. Laikykite prietaisą tokiu būdu kad mažytės kaiurymės šonuose nebūtų uždengtos
4. Kai žydras LED signalas greitai mirksi pūskite 5 sekundes giliai iš plaučių į alcotestetrio siaurą skylę. Tai aktyvuoja alkoholio koncentracijos kraujyje matavimą
5. Pastvobus žydras LED signalas indikuoja



6.

jog vykdomas alkoholio koncentracijos kraujyje matavimas

6. Žydras mirksintis LED signalas po matavimo indikuoja kog alkoholio koncentracijos kraujyje rodiklis suskaičiuotas

7. Raudonas mirksintis signalas indikuoja klaidą. Bandykite iš naujo

8. Išmatuotas alkoholio koncentracijos kruajyje lygis rodomas ir prietaise:

žalia spalva - blaivas

geltona spalva - iki 0.2‰

raudona spalva - daugiau negu 0.2‰

Jei išmaniojo telefono baterija išsikrovė - įmanoma naudoti alcotesterį atskirai. LED signalai apytikriai indikuos

7.

matavimo rezultatus. Papurtykite prietaisą ir vadovaukitės LED signalų instrukcijomis kaip aprašyta aukščiau

#### Tikslūs rezultatai


Siekiant tikslių rezultatų - palaukite 20 minučių po paskutinio gėrimo ar cigaretės. Priešingu atveju prietaiso parodymai gali būti netikslūs. Jei prietaisas nebuvo naudotas 24 valandas, rodomas rezultatas gali būti mažesnis dėl susikaupusių dulkių. Pakartokite matavimą.

#### Belaidis įkrovimas

Raudonai šviečiantys įrenginio šviesos diodai reiškia, kad

8.

išseko alcotesterio baterija. Baterijos įkrovimas trunka iki 180 minučių

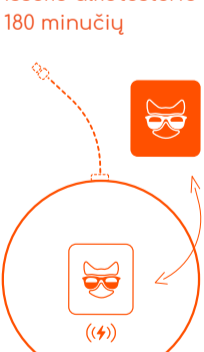

1. Prijunkite micro USB pakrovėją
2. Padėkite alcotesterį tiksliai ant pakrovėjo vidurio
3. Sekite mirksinčius LED signalus: raudonas signalas - pakrauta iki 20% geltonas signalas - pakrauta iki 70% žalias signalas - pakrauta iki 100%
4. Stabilus žalias signalas - alcotesteris pilnai pakrautas

9.

**Garantija:** Be anksčiau pateiktų apribojimų, ši garantija netaikoma:

- Naudojami ne Alcotocat aksesuarai, kaip antai kabeliai ar apsaugos priemonės
- įprastai nusidėvėjusiam ar pasenusiam produktui (pavyzdžiui, dėl įbrėžimų, įlinkimų, nusitrynimų), ilgainiui atsilaivinusiams ar nusidėvėjusioms dalims;
- defektams ar žalai dėl netinkamo naudojimo, nelaimingo atsitikimo, dalių pakeitimo, neįprasto suspaudimo, modifikavimo, netinkamo ar neleistino remonto, netinkamo saugojimo ar į prietaisą atsisiųstų trečiųjų šalių programėlių;
- Žalai dėl produkto naudojimo ne pagal leidžiamą paskirtį, nurodytą „Alcotocat“ pateiktose instrukcijose;

10.

- Kai produkto programinę ar aparatinę įrangą pakeičia ne oficialūs „Alcotocat“ asmenys;
- Kai naudojama netinkama įtampa, maitinimo šaltinis ar baterijos;
- Žala dėl pernelyg didelės drėgmės;
- Alcotesteris „Alcotocat“ gali būti naudojamas praėjus 20 minučių po alkoholinio gėrimo vartojimo;
- Silikono junginiai/garai gali sugadinti prietaisą. Prietaisas skirtas naudoti išvėdintose patalpose.

Norėdami prisidėti prie medžių išsaugojimo, informacijos, susijusios su privatumo politika, naudojimo sąlygomis, prietaiso naudojimu, taip pat DUK ir vaizdo įrašų ieškokite tinklalapyje [www.alcotocat.com](http://www.alcotocat.com).

