



1.

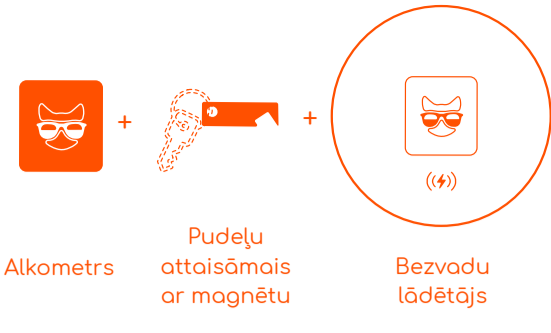

2.

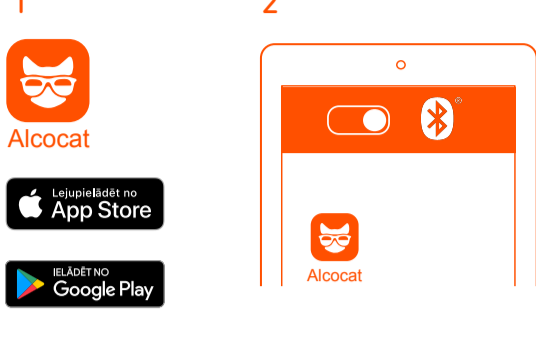

3.



4.

Sapāro Alcotest ar viedtālruni

1. Lejupielādējiet lietojumprogrammu Alcotest no App Store vai Google Play
2. Ieslēgt Bluetooth viedtālrunī un atvērt lietotni
3. Pakratīt elpas analizatoru 3 reizes lai ieslēgtu baltās LED gaismas uz ierīces
4. Sapāro elpas analizatoru ar viedtālruni un sāc to lietot

Alkometra LED gaismu signāli

Dziestoša balta gaisma - gatavs sapārošanai ar viedtālruni
Īsa sarkana gaisma - akumulators ir tukšs
Degoša balta gaisma - ierīces ir sapārotas

5.

- Kā lietot**
1. Nospieš lietotnē pogu vai sakratīt ierīci atkārtoti pēc tam kad ieslēdzas balta LED gaisma
 2. Kad zila LED gaisma sāk mirgot, alcometr sāc uzsilt
 3. Turot alcometer pārliecinieties, ka netiek aizsegti nelieli caurumi ierīces sānos, kas paredzēti gaisa plūsmi.
 4. Kad zilā LED gaisma sāk mirgot ātri, izdarīt dziļu izelpu no plaušām alcometra nelielās atveres virzienā, lai izmērītu alkohola saturu asinīs

6.

5. Degoša zila LED gaisma liecina, ka alcometr mēra alkohola saturu asinīs
6. Mirgojoša zila LED gaisma pēc mērījuma veikšanas nozīmē, ka alkohola saturs asinīs tiek aprēķināts
7. Mirgojoša sarkana gaisma pēc mērījuma nozīmē kļūdu. Mēģināt vēlreiz
8. Noteiktais alkohola saturs asinīs tiek parādīts arī uz ierīces:
 - zaļa gaisma - skaidrā prātā
 - dzeltena gaisma - līdz 0.2‰
 - sarkana gaisma - vairāk kā 0.2‰

Gadījumā, ja viedtālruna akumulators ir tukšs, pastāv iespēja lietot alcometru atsevišķi. LED gaismu krāsas

7.

parādīs aptuvenus mērījumu rezultātus. Sakratīt ierīci un sekot LED gaismu instrukcijām kā tas aprakstīts augstāk

Precīzi rezultāti

Lai iegūtu precīzu rezultātu sagaidīt kad pāriet 20 minūtes kopš pēdējā dzēriena vai cigaretes. Ja produkts nav lietots 24 stundas, ierīce var parādīt zemākus mērījumu rezultātus putekļu daļiņu dēļ. Ja nepieciešams, lūdzu pūtiet atkārtoti

Bezvadu lādēšana

Sarkanā LED gaisma norāda, ka elpas analizatora akumulators ir tukšs. Akumulatora uzlāde aizņem līdz 180 minūtēm

8.

1. Pievienot strāvas avotam pieslēgtu mikro USB kabeli lādētājam
2. Novietojiet alcometru tieši lādētāja vidusdaļā
3. Sekot mirgojošajai gaismai:
 - sarkana gaisma - uzlāde līdz 20%
 - dzeltena gaisma - uzlāde līdz 70%
 - zaļa gaisma - uzlāde līdz 100%
4. Degoša zaļa gaisma - alcometr ir uzlādēts

9.

Garantija: Neierobežojot iepriekšējo, šī garantija neattiecas uz sekojošo:

- Lietošana ar neoriģinālajiem piederumiem, tādiem kā kabeli un maciņi
- Produkta dabīgo nolietojumu un novecošanu kā rezultātā radušies skrāpējumi, iespaidumi, nodilums un detaļu valīgums, ko izraisījusi ilglaicīga lietošana;
- Defekti vai bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, negadījumu, izmaiņu un modifikāciju, pārslodzes, napareiza vai neautorizēta remonta, nepareizas glabāšanas vai nesavietojumu lietotņu ielādēšanas dēļ;
- Bojājumi, kas radušies lietojot produktu ārpus atļautajiem un paredzētajam lietojumiem, kas norādīti ražotāja Alcotest instrukcijās;

10.

- Produkta programmnodrošinājuma modifikācijas, ko veicis jebkurš cits kā Alcotest;
 - Lietošana ar nepiemērotu voltāžu, strāvas padevi vai akumulatoriem;
 - Bojājumi, kas radušies pārmērīga mitruma ietekmē;
 - Alcotest elpas analizatora lietošana mazāk kā 20 minūtes pēc alkohola lietošanas
 - Silikona savienojumi un gāzes var sabojāt produktu.
- Produkts ir paredzēts lietošanai telpās, kurās ir svaigs gaiss. Lai saglabātu koku, lūdzu iepazīstieties ar **Privātuma Politiku, Lietošanas nosacījumiem, ierīces lietošanu, un Biežāk uzdotajiem jautājumiem** izlasot informāciju un noskatoties video vietnē alcocat.com

